

# Инструкция к фитнес-браслету GL-21




ООО "Геликон Лайн"  
Москва 2022г.

## Внешний вид браслета



## Инструкция по зарядке браслета

Зарядите браслет перед использованием  
Напряжение: 5В  
Время зарядки ~2 часа

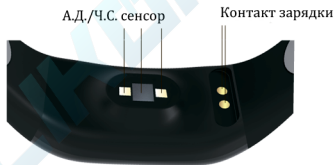

Сторона  
контакта с  
браслетом

Убедитесь, что кабель плотно  
прикреплен к контактам. При  
правильном расположении кабель  
притянет магнитом



## Внешний вид браслета

Для перемещения по пунктам меню необходимо делать короткие нажатия. Меню Цикличное.

### 1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ ①

Долгое нажатие на сенсор для включения/выключения браслета.

### 2. Дата и время ②

При первом использовании подключите браслет к смартфону через приложение N Band. Дата и время будут настроены автоматически.



### 3. Спорт режим ③④

Долгое нажатие на значке для входа в спорт режим. В этом режиме пульс измеряется постоянно, но при необходимости измерение возможно остановить. В спорт режиме показываются: текущий пульс, пройденная дистанция, время и потраченные калории.



#### 4. Шагомер ⑤

#### 5. Дистанция ⑩

#### 6. Потраченные калории ⑦

#### 7. Артериальное давление ⑧

Переместитесь в соответствующее меню со значком столбика и обозначением ММНГ. Необходимо подождать 25-60 секунд до появления результата. Браслет покажет значение давления, провибрирует и погаснет. Ручное измерение не будет сохранено в приложении. Если вам необходимо вести историю измерений, используйте приложение H Band, в котором возможно задать измерение давления в реальном времени или каждые 10 минут. Данные будут храниться в приложении.

Для более точных измерений, необходимо сделать индивидуальную калибровку браслета в программе H Band на смартфоне. Во время умной калибровки, нужно менять положение часов и датчика на запястье при каждом измерении и сравнивать с вашим домашним тонометром. Любое смещение браслета по оси на 5мм может координально менять показания А.Д. Опытным путем необходимо найти лучшую точку на запястье. Если у вас остались вопросы, позвоните нам +74956044843



⑤



⑦



⑧

#### 8. ЧСС-ПУЛЬС ⑨

В иконке с графиком будет отражен текущий пульс. Убедитесь, что браслет надет правильно и датчик плотно прилегает к коже, но не пережимает ее! Так же, в приложении H Band возможно настроить постоянное измерение пульса

#### 9. Мониторинг сна ⑩

Наблюдайте за активной фазой сна не снимая браслет на ночь. Индивидуальные настройки необходимо ввести в приложении.

## Bluetooth соединение со смартфоном

1. Включите браслет


2. Включите смартфон

3. Загрузите приложение «H Band» из магазина приложений вашего смартфона (Apple store / Google play store) или с официального сайта, отсканировав QR-код.



4. Зайдите в приложение H Band на вашем смартфоне. Необходимо дать ВСЕ разрешения приложению.

Зайдите в поле «Подключить устройство», выполните поиск устройств и выберите «F21». После удачного сопряжения, дата и время на браслете синхронизируются со смартфоном.

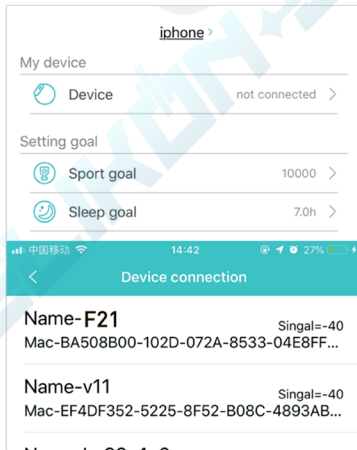

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на фитнес-браслет 1 год.

Обмен по причине заводского дефекта возможен в течении 1 года с момента покупки. Возврат возможен в течении 14 дней, при сохранении всех пленок и товарного вида устройства. При наличии следов эксплуатации и повреждений устройства, в возврате будет отказано. Физические повреждения, использование не по назначению, в том числе плавание, принятие душа и т.д. не являются гарантийным случаем и во возврате так же будет отказано.

**БРАСЛЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПРИБОРОМ! ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОЦЕНОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ, ПРЕПАРАТОВ И Т.Д.**

Товар сертифицирован!

Контакты для вопросов по эксплуатации и гарантийному

обслуживанию :

8(800)4446867

+7(495)6044843

email: info@zummer.ru

сайт: gelikon-line.ru

Внимание:

За положительный отзыв на ozon.ru вы можете получить возврат в размере 350 руб. на карту.

За отзыв на Яндекс Маркет 100 руб.

За размещение нескольких отзывов на разных площадках с фотографиями и подробным описанием возврат 500 руб.!

Подробнее: 8(800)4446867